

[ODOiA.pl](#)

Generowanie raportów z STK SIGMA

Zaktualizuj program ODOiA

Uruchom program ODOiA

Ustaw skrót do folderu **OdoiaRaporty**

W folderze OdoiaRaporty sprawdź generowane raporty z testów STK SIGMA

Pobierz tą instrukcję w PDF

Generowanie raportów z STK SIGMA

Zaktualizuj program ODOiA

1. Podczas uruchamiania programu w oknie startowym wybierz **Aktualizuj**
2. Wciśnij **Sprawdź aktualizacje**
3. Wybierz Pobierz **aktualizacje**

Proszę wybrać na której bazie danych pracować

- 1.Uruchom
- 2.Uruchom
- 3.Uruchom
- 4.Uruchom
- 5.Uruchom
- 6.Uruchom
- 7.Uruchom
- 8.Uruchom
- 9.Uruchom
- 10.Uruchom
- 11.Uruchom
- 12.Uruchom

wersja klient - klient

Ustawienia

OK - Uruchom

Aktualizuj

Zamknij

ZDALNA POMOC

Tutoriale www.odoia.pl

Obsługa Danych Osobowych i Aparatury
Obsługa Danych Osobowych i Aparatury v.22 02 20 D2
Alfa - Electronics licencja do: 2025.07.11

Proszę wybrać na której bazie danych pracować

- 1. Uruchom
- 2. Uruchom
- 3. Uruchom
- 4. Uruchom
- 5. Uruchom
- 6. Uruchom
- 7. Uruchom
- 8. Uruchom
- 9. Uruchom
- 10. Uruchom
- 11. Uruchom
- 12. Uruchom

wersja klient - klient

Ustawienia **OK - Uruchom** Aktualizuj

Zamknij ZDALNA POMOC Tutoriale www.odoia.pl

Panel aktualizacji

Wykup możliwość pobierania aktualizacji przez 1 rok.
Podaj NIP i e-mail w celu wystawienia faktury VAT
Cennik: - posiadam licencję wykupioną po 3 lipca 2018 r = 230 zł brutto
 - posiadam licencję wykupioną przed 3 lipca 2018 r = 350 zł brutto
To pole zostaw puste

e-mail:
powtórz e-mail:
NIP:

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty - fakturę proszę wysłać na powyższy e-mail

Aktualizacje można pobierać do: 2023.07.11
Pobieranie aktualizacji:

Podziel się swoimi uwagami lub zgłoś usterki w ODOIA.

Wyczyść treść Wyślij wiadomość

Obsługa Danych Osobowych i Aparatury
Obsługa Danych Osobowych i Aparatury v.22 02 20 D2
Alfa - Electronics licencja do: 2025.07.11

Proszę wybrać na której bazie danych pracować

- 1. Uruchom
- 2. Uruchom
- 3. Uruchom
- 4. Uruchom
- 5. Uruchom
- 6. Uruchom
- 7. Uruchom
- 8. Uruchom
- 9. Uruchom
- 10. Uruchom
- 11. Uruchom
- 12. Uruchom

wersja klient - klient

Ustawienia **OK - Uruchom** Aktualizuj

Zamknij ZDALNA POMOC Tutoriale www.odoia.pl

Panel aktualizacji

Wykup możliwość pobierania aktualizacji przez 1 rok.
Podaj NIP i e-mail w celu wystawienia faktury VAT
Cennik: - posiadam licencję wykupioną po 3 lipca 2018 r = 230 zł brutto
 - posiadam licencję wykupioną przed 3 lipca 2018 r = 350 zł brutto
To pole zostaw puste

e-mail:
powtórz e-mail:
NIP:

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty - fakturę proszę wysłać na powyższy e-mail

Aktualizacje można pobierać do: 2023.07.11
Pobieranie aktualizacji:


Podziel się swoimi uwagami lub zgłoś usterki w ODOIA.

Wyczyść treść Wyślij wiadomość

Uruchom program ODOiA

Aby powstał folder OdoiaRaporty uruchom program wciskając przycisk **OK -Uruchom**

Ustaw skrót do folderu OdoiaRaporty

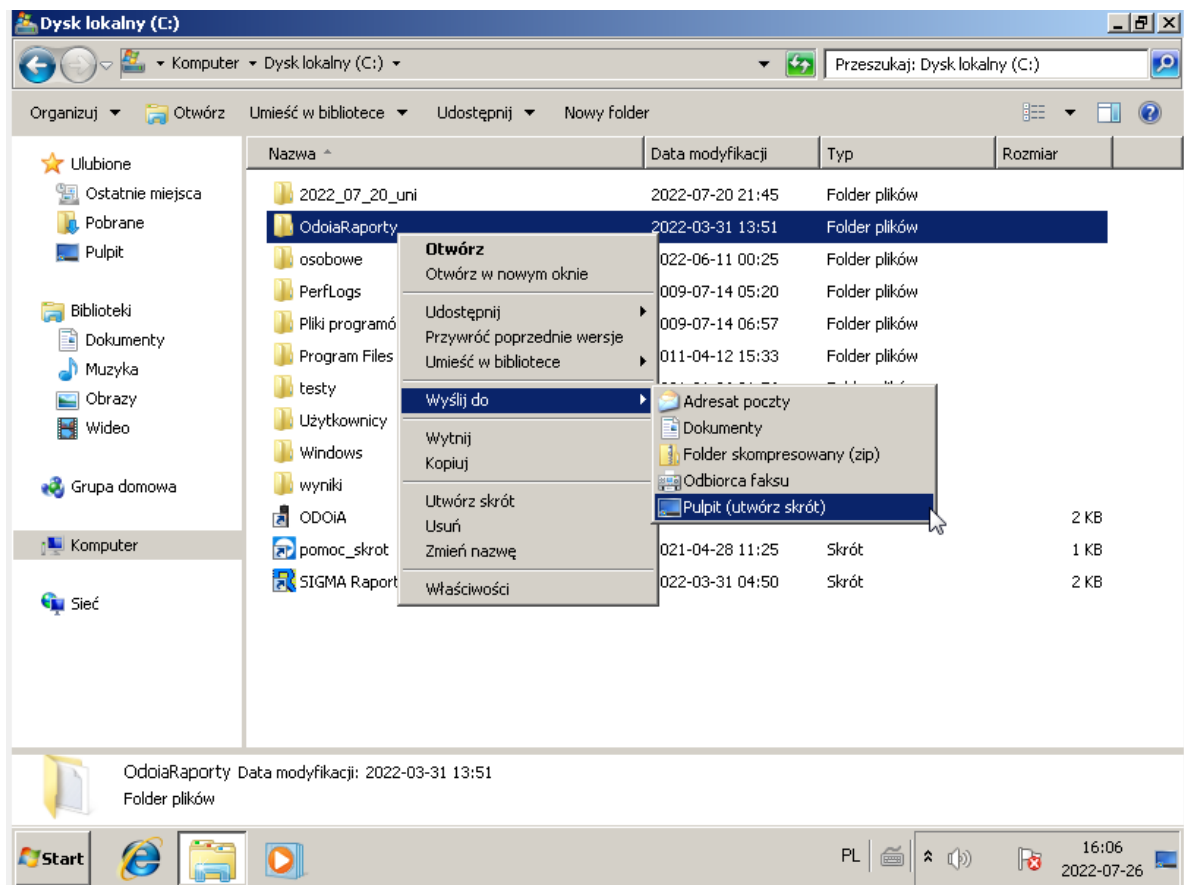

W folderze OdoiaRaporty sprawdź generowane raporty z testów STK SIGMA

1. Po zakończeniu badań w STK SIGMA i pobraniu wyniku do karty badania pojawi się przez kilka sekund program generujący raporty
2. Z utworzonego skrótu **OdoiaRaporty** utworzonego na **Pulpicie** komputera wejdź do folderu
3. W folderze znajdą się w pliki **PDF** wygenerowane raporty w nazwie posiadające imię i nazwisko osoby badanej
4. Raporty **archiwizuj** na przykład na dysku przenośnym i drukuj w razie potrzeby

Pobierz tą instrukcję w PDF

[pobierz tą instrukcję w PDF](#)

Piotr Majchrzak 2022